
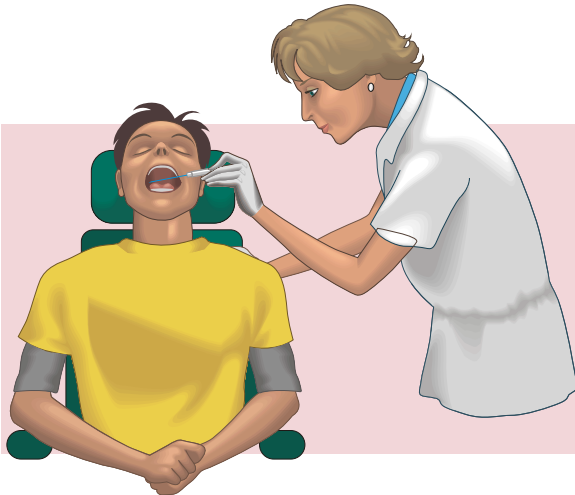



## COLETA DE DNA PELO SWAB BUCAL ( Técnica da Saliva )

**1** A caixa contém 6 tubinhos contendo a solução conservante do DNA. Os tubos vermelhos são para a mãe, os azuis para o suposto pai e os transparentes para o filho(a). Identificar os tubos com os nomes dos envolvidos.

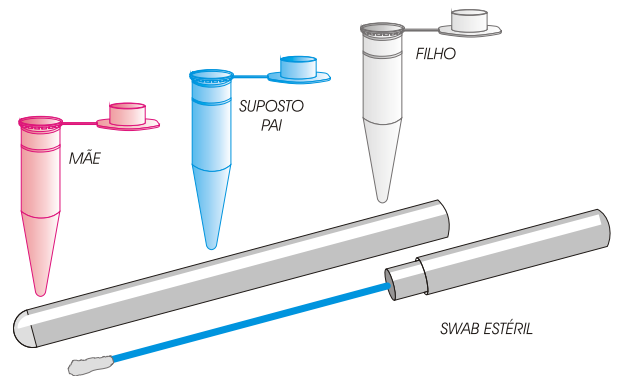


**2** Pegue o swab, rompa o lacre e passe na parte interna do lábio (bochecha). Passe o swab vigorosamente por 30 segundos como se estivesse escovando os dentes. Passe também no sulco entre a gengiva e bochecha (superior e inferior). Um swab para o lado direito e outro para o lado esquerdo da boca.

**3** Coloque a ponta do swab no tubo e corte com uma tesoura. Feche o tubo. Colher 2 swabs de cada pessoa.

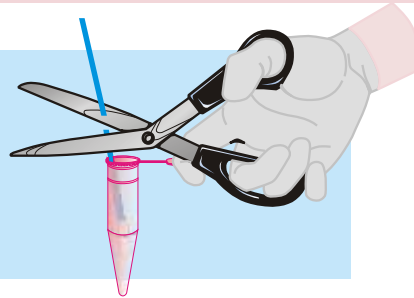


**4** Lave a ponta da tesoura com água para descontaminar. Pode iniciar outra coleta.

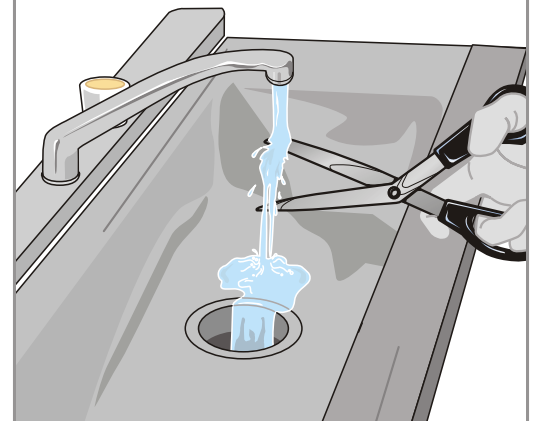

**5** Importante: Realizar uma coleta de cada vez.

**6** Após terminar a coleta, mostre os tubos aos envolvidos e lacre-os com uma fita adesiva. Lacre a caixa, na frente dos pacientes.

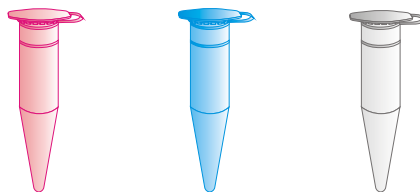

**7** Manter o material em temperatura ambiente. Não colocar em geladeira. Não congelar. O material deverá chegar ao laboratório em no máximo 04 dias.

**8** Enviar ao Departamento de Genética Humana.